



**ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
БИРОК**

2023

1 ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ



Вы обязаны произвести идентификацию вскоре после рождения животного, а точнее в течение семи суток – это Закон!

Если возникла ситуация когда теленок не был идентифицирован вовремя, рекомендуется производить биркование во время отъема или при осуществлении идентификации остальных животных, содержащихся на животноводческом объекте.

Идентификацию животных может осуществлять любое ответственное лицо имеющее необходимые компетенции и опыт.

Правильная и качественная идентификация не приносит животному большого дискомфорта и страданий, однако неверно проведенная процедура биркования может навредить животному и иметь неблагоприятные последствия.

2

ВАРИАНТЫ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНОГО




Используйте станок с головными воротами, чтобы обезопасить животное. Для того чтобы пометить полностью выросшего бычка или телку, сначала необходимо будет безопасно ограничить движение животного, используя станок с головными воротами или доступный ограничитель.

Станок, как правило, не нужен для осуществления идентификации молодых телят. Просто положите теленка на бок и держите его крепко, но осторожно. Для процедуры идентификации вне станка вы можете попросить помощь других сотрудников фермы.

Беспорядочное движение животных может увеличить риск травмы при осуществлении идентификации или привести к неудачному мечению, которое впоследствии приведет к утере средств идентификации.

3 ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТО УСТАНОВКИ

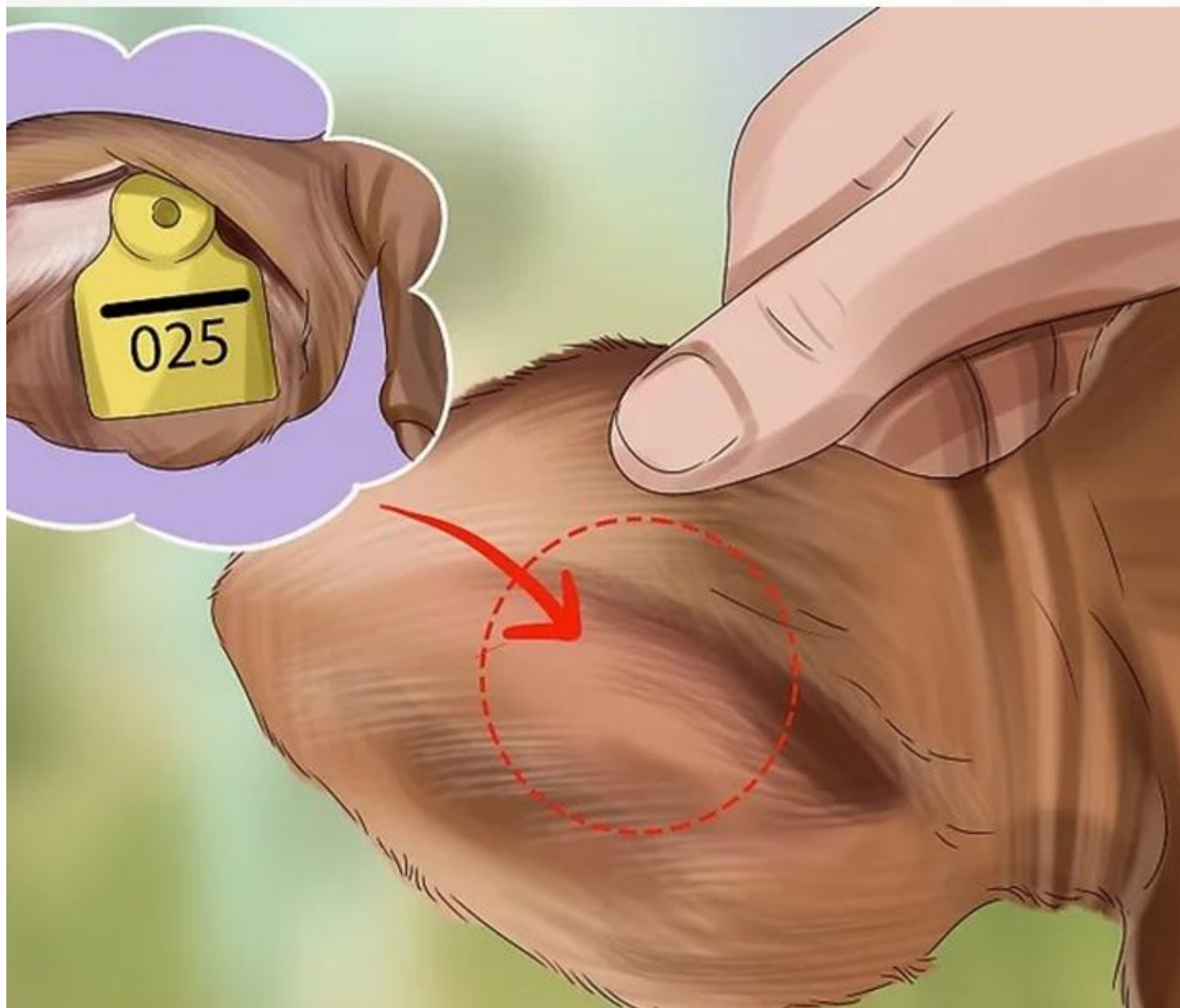

Найдите мягкое место в средней части уха между верхним и нижним хрящом.

Мясистая часть уха обеспечит оптимальную видимость, окажет наименьшее сопротивление и приведет к наименьшему дискомфорту для животного.

Всегда держите свое оборудование для идентификации на безопасном расстоянии от ушного канала или окружающего его хряща, а также от глаз животного.

4

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ БИРКИ



В Республике Беларусь разрешено использовать бирки, поставляемые только теми изготовителями средств идентификации, которые прошли регистрацию в государственном учреждении Центр информационных систем в животноводстве.

Все они опубликованы на сайте www.airc.by

5 ПРОВЕДИТЕ ДЕЗИНФЕКЦИЮ



Для благополучия вашего скота важно, чтобы все материалы, которые вступают в контакт с ухом животного, были должным образом стерилизованы. Протрите штифтовые (мужские) и клипсовые (женские) компоненты дезинфицирующим раствором. Это уничтожит патогенные микроорганизмы и снизит риск заражения животного, а также обеспечит скорейшее заживание уха животного.

Для дополнительной защиты, вы также можете смазать внутреннюю и внешнюю поверхности уха животного с помощью ткани или ватного тампона, смоченного в спирте. Позаботьтесь о том, чтобы дезинфицирующий раствор не попал в ушной канал или в глаза.

В дополнение к защите ваших животных от инфекции, своевременная очистка и дезинфекция аппликатора после каждого сеанса идентификации будет поддерживать его работу дольше.

6 УСТАНОВИТЕ БИРКИ В АППЛИКАТОР




Вставьте заостренную шпильку на задней стороне визуальной панели на длинный тонкий штифт аппликатора. Затем поместите запорный элемент в зажим на противоположном плече аппликатора.

Прежде чем продолжать дальше, дважды проверьте, чтобы обе части бирки были полностью вставлены и надежно прикреплены.

Современные аппликаторы часто маркируются наклейками с диаграммами, указывающими, куда идет каждая деталь и как ее правильно установить.

Убедитесь, что панель бирки обращена в сторону от мужской части бирки, чтобы она была видна с внешней стороны уха животного.

7 ПРОВЕРЬТЕ ЧАСТИ БИРКИ В АППЛИКАТОРЕ

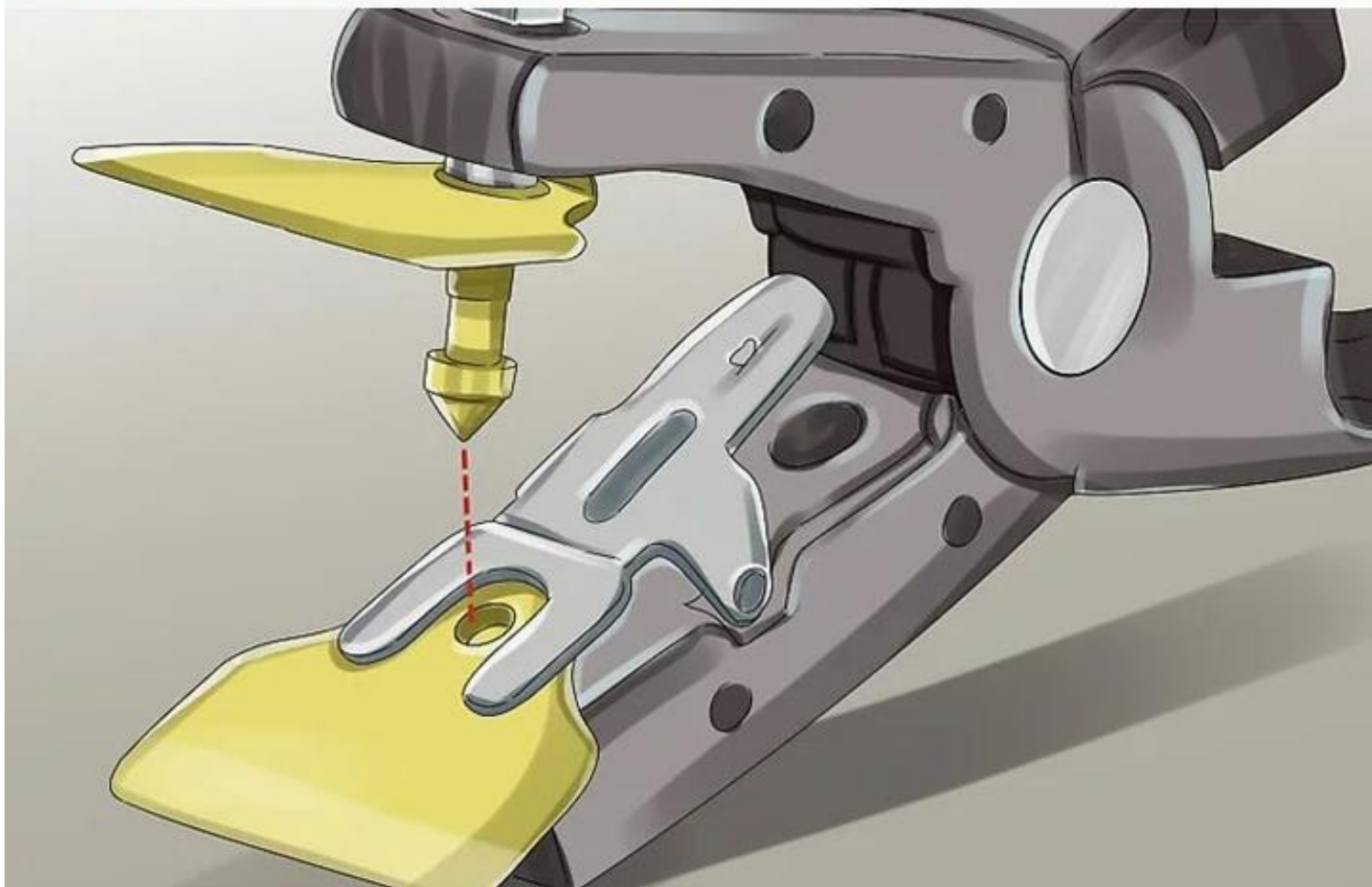

Прежде чем вы перейдете к идентификации, попрактикуйтесь с вашим аппликатором. Медленно сожмите ручки устройства вместе, чтобы «челюсть» аппликатора закрылась непосредственно для конструкции бирки. Заостренный штифт должен быть идеально центрирован с отверстием в подложке.

Если отверстие и штифт не выровнены, может потребоваться их снять и переустановить.

Будьте осторожны, чтобы не закрыть «челюсть» полностью, иначе вы испортите бирку и не сможете ее установить на ухо животному.

8

НАЧНИТЕ УСТАНОВКУ БИРКИ



Держите аппликатор в доминирующей руке, а другой рукой осторожно растягивайте и сплющивайте ухо животного.

«Челюсти» аппликатора должны парить над мягкой центральной частью уха, которую вы точно определили ранее.

Не забывайте придерживать мясистую ткань и избегать хрящей, а также видимых кровеносных сосудов и других легко повреждаемых структур уха.

9 ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППЛИКАТОР



Зажмите аппликатор плотно и быстро. Сожмите ручки аппликатора вместе плавным уверенным движением. Вы услышите громкий щелчок, когда две половины бирки сойдутся вместе. Как только бирка будет на месте, отпустите ручки и оттяните аппликатор.

Для уменьшения дискомфорта говорите с животным мягким голосом и гладьте его по голове и шеи, но избегайте прикосновения к его ушам.

Вам необходимо максимально быстро установить бирку, прежде чем животное начнет активно шевелить головой.

Не давите на ручки аппликатора, пока однозначно не будете готовы установить бирку.

Учтите, что неспособность установить бирку с первой попытки усложнит ваши дальнейшие попытки.




Убедитесь, что бирка правильно расположена, безопасна и не причиняет животному никакого дискомфорта.

Запишите уникальный идентификационный номер животного для последующей регистрации его в государственной информационной системе.

При использовании электронного идентификационного устройства (EID) важно, чтобы визуальная панель (лицевая сторона) была расположена на внешней части уха, где она может быть хорошо и легко видна.

11

ПРИСТУПАЙТЕ КО ВТОРОМУ УХУ

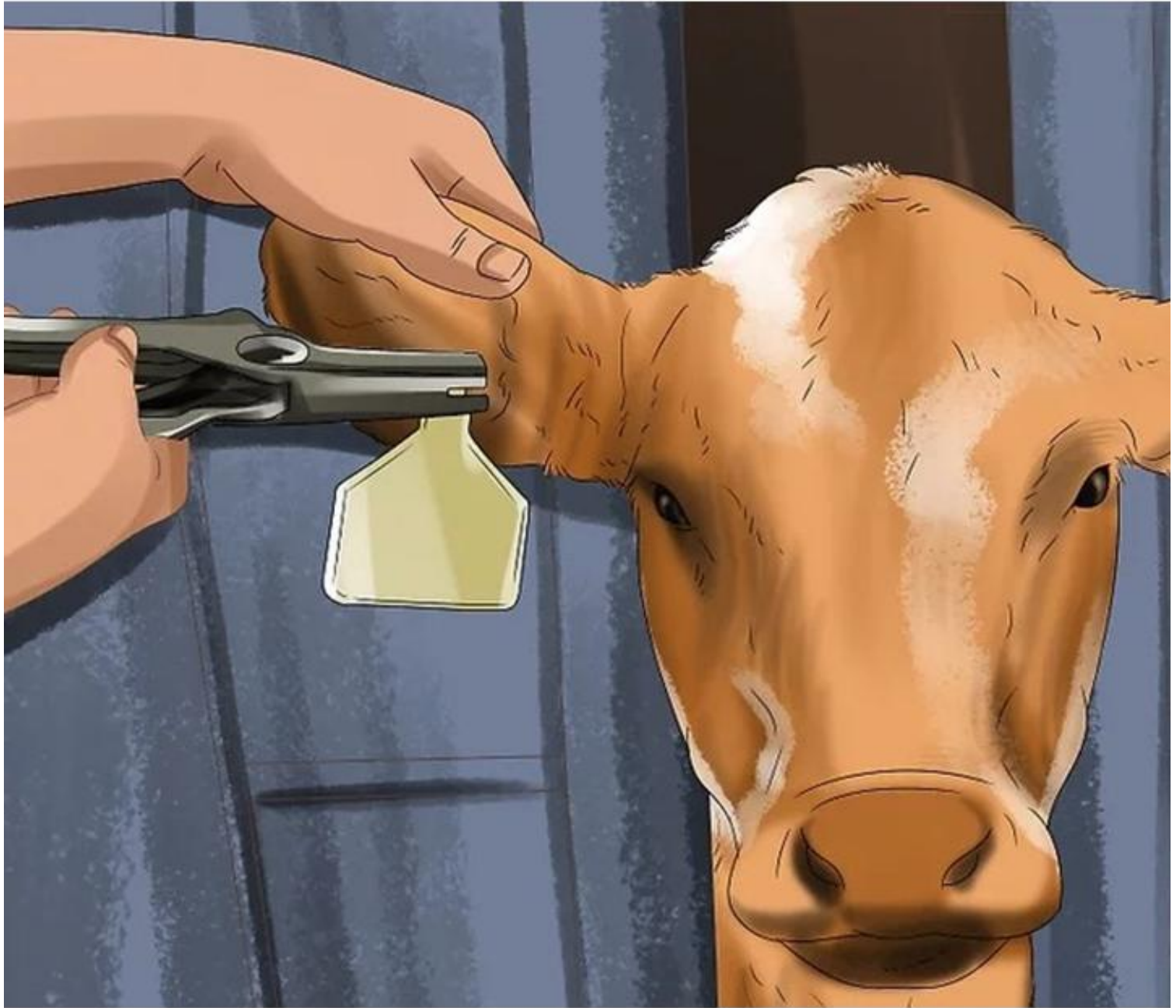

Произведите установку бирки на второе ухо животного.



Проверяйте место установки бирки на наличие признаков инфекции в течение следующих 5-7 дней.

Внимательно следите за областью вокруг бирки. Любое чрезмерное покраснение, отек или выделения, которые вы наблюдаете, должны рассматриваться как проблема.

Применение местного дезинфицирующего средства, может иметь большое значение для предотвращения инфекции, особенно если ваше животное проводит много времени на выпасе во влажных условиях.

При необходимости обрабатывайте место установки бирки дезинфицирующим средством в течение как минимум 3-5 дней после заживления раны.

Если симптомы инфекции не исчезают в течение примерно недели, обратитесь к ветеринарному врачу.



Проводить идентификацию животных желательно в прохладную и сухую погоду, это позволит снизить риск инфицирования уха.

Всегда храните неиспользованные бирки в чистом и сухом контейнере или пакете. Не допускайте попадания активных солнечных лучей на хранимые бирки.

Регулярно следите за установленными бирками на животных.

Вы должны быть ознакомлены с анатомией уха животного, прежде чем начинать идентификацию. Посмотрите в открытых источниках на строение уха животного или попросите опытного коллегу или ветеринарного врача рассказать вам об этом.

При возникновении любых вопросов в процессе идентификации животных всегда обращайтесь в Центр информационных систем в животноводстве.